



Prélèvement de l'urine dans les tubes à partir d'une poche autocollante


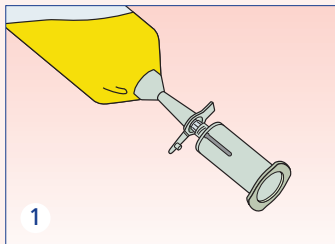


Assembler l'adaptateur luer avec le corps BD Vacutainer®.

Connecter l'adaptateur sur le site de prélèvement de la poche autocollante.

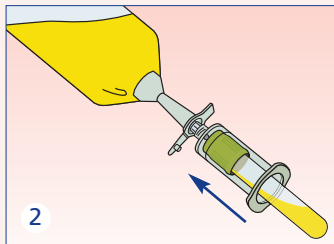

Insérer le tube et le **percuter**.
Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.
Veiller à remplir les tubes en fonction du niveau de remplissage indiqué sur l'étiquette.

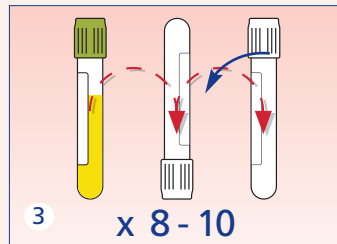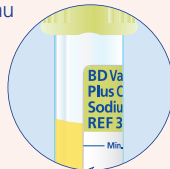

Homogénéiser le tube par 8 à 10 retournements.

Identifier l'échantillon et le **transmettre** au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT DES TUBES



1 • SANS ADDITIF



2 • BACTÉRIOLOGIE

BD Diagnostics - Preanalytical Systems

Becton Dickinson France S.A.S. Siège social: 11, rue Aristide Bergès – B.P.4 - 38801 Le Pont de Claix Cedex.

Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 Euros.

BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson & Company. © 2010 BD - ME_UrinePoche1_A6_11/11_V01



Pour que chacun
vive en bonne santé