

# BD Safety-Lok™


## Unité à prélèvement de sang Sécurité



*Pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion de courte durée (2h). Avec ou sans adaptateur Luer. Système de protection intégré. Mise en sécurité confirmée par un clic sonore. Technique unimanuelle. Sous blister individuel.*



Une fois le prélèvement terminé, pré-positionner la compresse, sans appuyer sur le site de ponction. De l'autre main, saisir entre le pouce et l'index l'embase de l'étui protecteur jaune, et la tubulure avec les autres doigts.

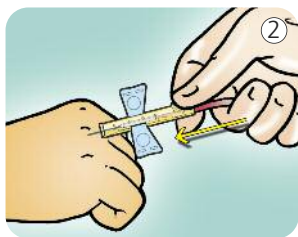

Maintenir la tubulure et pousser l'étui protecteur jaune vers l'avant, en tendant le pouce et l'index, jusqu'à l'obtention d'un "clic".



Ce "clic" sonore en bout de course confirme la neutralisation complète de l'aiguille, en position verrouillée dans l'étui protecteur. Eliminer l'ensemble du système en fonction des procédures en vigueur dans l'établissement.

**Attention** : ce système ne doit être utilisé que par des utilisateurs dûment formés. Avant utilisation, lire les instructions jointes dans l'emballage. Manipuler tous les échantillons biologiques et les objets piquants selon les procédures propres à votre établissement.

**EXT-MU-1.2-042-01**

BD Diagnostics - Preanalytical Systems  
11, rue Aristide Bergès, 38800 Le Pont de Claix - Tél. 04 76 68 36 36  
[www.bd.com/fr/pas](http://www.bd.com/fr/pas) - email : [vacutainerfr@bd.com](mailto:vacutainerfr@bd.com)



Pour que chacun vive en bonne santé