


## TEMPS DE SAIGNEMENT PAR METHODE IVY


Matériel :

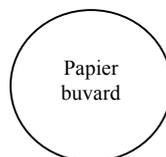

1 - Appliquer au bras une pression de 40mm de Hg ( 30 mm Hg pour les enfants) à l'aide d'un brassard à tension.




2 - Choisir une zone sur la face antérieure du bras 5 cm en dessous du pli du coude dépourvue de veine.  
- Désinfecter le point de ponction à l'aide d'un désinfectant (l'alcool est à proscrire)

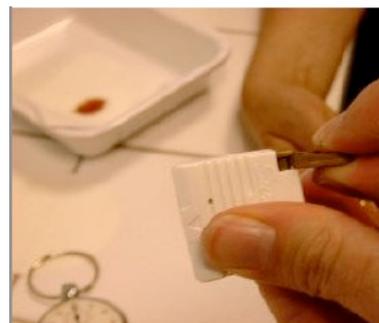

3 - Retirer l'attache de sureté du surgicut



4 - Tenir fermement le dispositif puis appuyer sur le bouton afin de libérer la lame.  
- Déclencher le chronomètre.

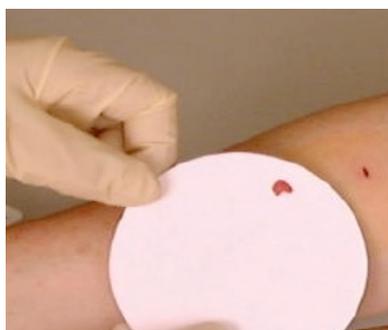

5 - Prélever toutes les 30 secondes les gouttes de sang apparues à l'aide du papier buvard sans toucher le clou plaquettaire.  
- Lorsque le sang n'apparaît plus sur le papier buvard, noter le temps