


# Transfert de l'urine à partir du pot de recueil


## Recommandations d'utilisation



1  
Soulevez l'étiquette blanche et collez-la au bord du couvercle.  
**Transférez l'urine du pot vers les tubes dans les meilleurs délais.**

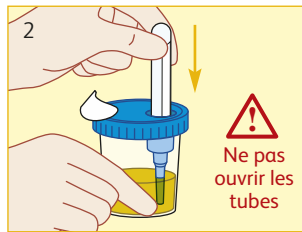


2  
Insérez le tube en poussant à fond.  
Attendez la fin du remplissage avant de retirer le tube.

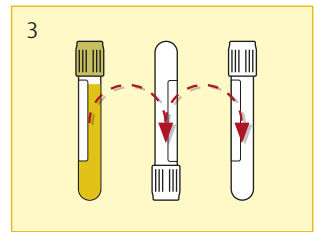

3  
Homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).



4  
Remplacez l'étiquette sur l'orifice du couvercle.

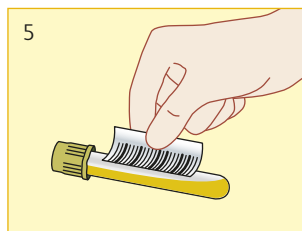

5  
Identifiez l'échantillon.

