



Réalisation d'un prélèvement de gorge avec un écouvillon BD Eswab



Ouvrir le kit de prélèvement d'échantillon **BD ESwab**

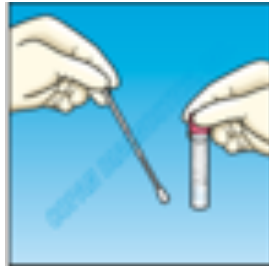

Retirer le tube et l'échantillon

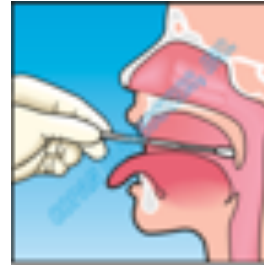

Prélever l'échantillon sur le patient



Dans des conditions aseptiques, dévisser et retirer le bouchon du tube.



Insérer l'écouvillon dans le tube et plier la tige de l'écouvillon au point de cassure indiqué par la ligne de couleur visible sur la tige de l'écouvillon afin de casser la tige. Mettre au rebut la partie cassée de la tige de l'écouvillon dans un conteneur approuvé de déchets médicaux.



Replacer le bouchon



Ecrire les informations relatives au patient sur l'étiquette du tube ou apposer l'étiquette d'identification du patient. Envoyer l'échantillon au laboratoire d'analyse.