


Unité de prélèvement à ailettes


Sécurité BD Safety-Lok™

Recommandations d'utilisation

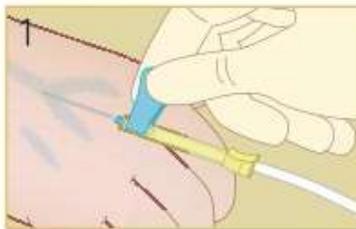


Effectuer la ponction en maintenant l'unité de prélèvement par les ailettes.

Puis réaliser le prélèvement de sang suivant votre technique habituelle.

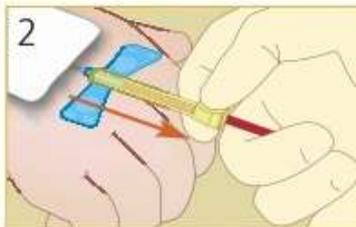

Une fois le prélèvement terminé, placer une compresse, **sans appuyer** sur le site de ponction. Saisir l'embase de l'étui protecteur jaune entre le pouce et l'index, et la tubulure avec les autres doigts.

Dépiquer.

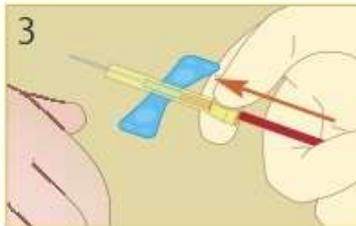

Maintenir la tubulure et pousser l'étui protecteur jaune vers l'avant, en tendant le pouce et l'index. L'aiguille coulisse à l'intérieur de l'étui jaune.



Le "clac" sonore en bout de course confirme la neutralisation complète de l'aiguille, en position verrouillée dans l'étui protecteur.



Éliminer l'ensemble du système dans le collecteur prévu à cet effet.

Becton Dickinson France S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 62 823 000 euros.
RCS Grenoble B 056 501 711 - Siret 056 501 711 00115.

BD, Le Pont de Claix, 38800, FR
bd.com/fr

